

db

dents blanches

La technologie de blanchiment des dents fournie par www.dents-blanches.eu a été développée pour vous donner les meilleurs résultats sans avoir recours à de longues et coûteuses visites chez votre dentiste. Trente minutes d'application par jour pendant deux semaines suffisent pour rendre vos dents visiblement plus blanches.

Notice d'utilisation du stylo blanchiment dentaire



Le stylo de blanchiment dentaire est équipé d'un embout spécial en pinceau pour atteindre des endroits tels que les espaces inter-dentaires et pour favoriser un blanchissement uniforme.

Tournez et cliquez sur le stylo pour dispenser du gel sur le bout lisse de la brosse.

- Peignez le gel sur vos dents, laissez agir pour 10 à 30 minutes.
- Peignez les dents du sourire sur la surface extérieure.
- Évitez le contact du gel avec les gencives et les lèvres.
(Arrêtez l'application en cas de contact douloureux, cela signifie que vous avez appliqué trop ou mal le gel)
- Utilisez une à deux fois par jour pendant 15 jours.
- Rincez et brossez vos dents après utilisation.
- Peut être utilisé avec des gouttières thermodéformables.

Vous trouverez l'ensemble de nos notices et des compositions de nos produits sur notre site internet

